

Kurzanleitung Radiologie Portal mit Verifikationscode per e-Mail:

Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort über folgenden Link an:

<https://portal.balgrist.ch/pacs/?login=hin>

Geben Sie den Verifikationscode ein, welchen Sie per E-Mail erhalten haben.

Verifikation

Code:

Verifizieren

Nach der ersten Anmeldung werden Sie gebeten, das Passwort zu ändern.

Zusätzlich existiert noch ein 2. Link welcher direkt auf dem Radiologie-Befund hinterlegt ist und mit welchem man nach dem Einloggen einen Direktzugriff auf die Bilder des Befundes hat.

Über die Patientensuche können Sie nach Nachname (mindesten die ersten 3 Buchstaben eingeben), Geburtsdatum, Modalität oder Datum der Untersuchung suchen.

Unter Hilfe, finden Sie die detaillierte Anleitung zum Portal.

Main Konto | Patientensuche | Downloads | Hilfe

Patientensuche

TEST	PORTAL	M	720656	12.12.1974	42	29.11.2017
------	--------	---	--------	------------	----	------------

1 Patient

In der erweiterten Suche, können Sie zum Beispiel nach Zeitraum (z.B: 300, sind 300 Tage) oder nach Modalität (CT, MR, CR usw.) suchen. Per Default ist die erweiterte Suche mit den letzten 14 Tagen ausgefüllt.


Nachname	Vorname	Sex	PatID	Geburstag	Alter	Datum	MD
						300	MR

Mit Doppelklick auf den Patienten wird er mit all seinen Untersuchungen geöffnet. Doppelklick auf die gewünschte Untersuchung öffnet diese. Mit Doppelklick auf ein Vorschaubild oder drag and drop in den Arbeitsbereich erscheint dieses im Arbeitsbereich.




Funktionen in der Untersuchungsliste

1. Alle Untersuchungen herunterladen
2. Zurück in die Patientensuche geht es über Linksklick auf das Menu und dann auf die Lupe
3. Eine Untersuchung herunterladen
4. Arbeitsbereich definieren
5. Der Arbeitsbereich leeren

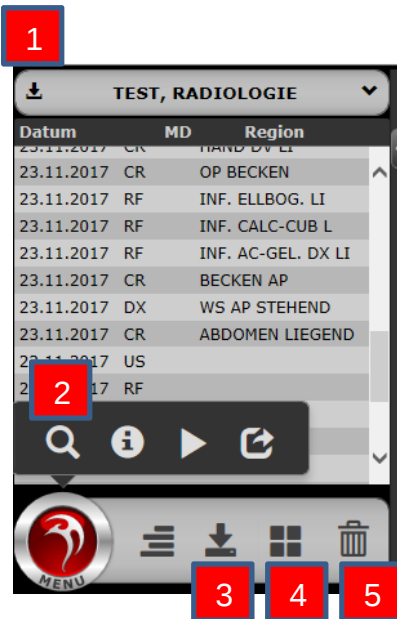

Werkzeuge

1. Bild entfernen
2. Änderung zurücksetzen
3. Kontrast / Helligkeit anpassen
4. Scrollrad Zoom deaktivieren
5. Länge messen
6. Winkel messen
7. Invertieren
8. Voller Bildschirm

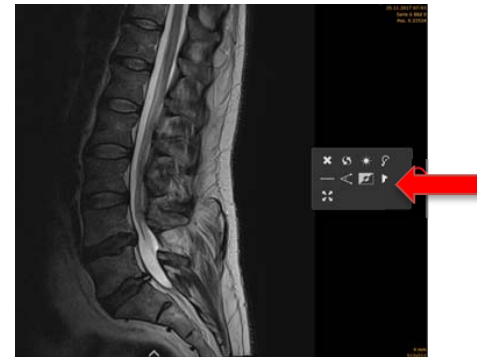

Aktive Funktion deaktivieren mit Klick auf die Funktion im oberen Bereich des Bildes

